

172 mm

300 mm

PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS une efficacité cliniquement prouvée pour réduire les symptômes de la rhinite allergique, en bloquant les allergènes qui provoquent la réaction allergique. Le spray nasal **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** agit directement au début de la réaction allergique, sur la muqueuse respiratoire du nez. La technologie brevetée Nasya™ de **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** utilise une combinaison d'huiles et d'émulsifiants, qui donnent des propriétés de transformation uniques du gel au liquide pour une dispersion facile. En se déposant sur la muqueuse nasale, **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** retrouve sa consistance initiale de type gel pour former une barrière de micro-gel imperméable aux allergènes. Comme la plupart des allergènes aéroportés pénètrent par le nez, **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** est une solution idéale pour le rhume des foins et la rhinite allergique.

QUAND UTILISER PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS

Utilisez **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** dès que vous ressentez les premiers symptômes, avant que la réaction allergique ne se soit complètement développée. Si une réaction allergique a déjà été déclenchée, **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** peut être utilisé en complément d'autres traitements contre le rhume des foins afin de prévenir toute exposition supplémentaire à des allergènes susceptibles de provoquer une autre réaction. Il est également conseillé d'utiliser **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** avant d'entrer en contact avec des allergènes, car il les empêche d'atteindre la muqueuse nasale et limite les symptômes d'allergies.

COMMENT FONCTIONNE PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS?

PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS agit directement là où les allergènes déclenchent une réaction allergique, sur la muqueuse respiratoire du nez.



Gel au repos, liquide après agitation.

PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS une fois secoué, il devient fluide pour une dispersion facile, puis se réinstalle sur la muqueuse nasale sous forme de gel pour bloquer le contact avec les allergènes.

Le micro-gel **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** agit sur 3 niveaux:

- 1. Sa formule brevetée désamorce le pollen déjà à l'intérieur du nez.
- 2. Il stimule la clairance des allergènes dans le nez.
- 3. Sa fine brume se dépose pour former une barrière de microgel imperméable afin d'empêcher un pollen supplémentaire d'infecter la muqueuse.

Contre-indications

Ce produit contient de l'huile de graines de sésame. N'utilisez pas ce produit si vous êtes sensible à l'huile de graines de sésame ou à l'un des autres composants de Prevalin Allergy. De très rares cas de réaction allergique à **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** ont été signalés. Ils comprennent des symptômes tels que nez bouché, qui coule, douleur localisée, sécheresse, démangeaisons et gonflement du nez, larmolement et éruptions cutanées. En cas de suspicion d'allergie à **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS**, arrêtez immédiatement l'utilisation et si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

COMMENT UTILISER PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS

Appliquer 1 à 2 pulvérisations dans chaque narine, 2 à 3 fois par jour (fonctionne jusqu'à 6 heures). **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** convient aux enfants de 6 à 12 ans. **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Moucher le nez toujours soigneusement avant chaque application.



Étape 1
Avant d'utiliser **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS**, secouer vigoureusement le flacon en position verticale pendant au moins 4 fois.



Étape 2
Retourner le flacon et secouer à nouveau pendant au moins 4 fois.



Étape 3
Retirer le bouchon jaune du flacon.



Étape 6
Incliner la tête vers l'arrière brièvement après l'application et respirer normalement par le nez.



Étape 5
Incliner la tête légèrement vers l'avant. Tener le flacon en position verticale, insérer complètement la pointe dans la narine et vaporiser une fois. Vaporiser de nouveau si nécessaire. Faites le pour les deux narines.



Étape 4
Amorcer la pompe avant la première utilisation. Pour amorcer, appuyer sur l'applicateur blanc pendant 5 à 10 secondes, puis relâcher. Répéter jusqu'à obtention d'une pulvérisation complète.

Au cours de la première heure d'utilisation, vous pouvez ressentir un nez légèrement bouché. Cette sensation est passagère. elle disparaîtra rapidement et disparaîtra avec une utilisation ultérieure. Vous pouvez également ressentir une forme d'irritation lors de la première application de **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS**, qui disparaîtra rapidement. Si vous ressentez une gêne grave après l'application de **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS**, arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin. Si l'utilisation simultanée d'un autre vaporisateur nasal est requise, **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** doit être appliqué de nouveau par la suite afin de maintenir la protection barrière imperméable. Évitez tout contact avec des plaies ouvertes.

Comment conserver PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS

À conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas conserver au-dessus de 27 ° C (80,6 ° F). Ne pas réfrigérer ni congeler car des températures plus basses peuvent affecter la taille des gouttelettes et la formation de pulvérisation. Peut être utilisé dans les 90 jours après l'ouverture. Ne pas utiliser après la date de péremption. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ingrédients:

Veegum bentonite, gomme xanthane, monostéarate de glycérol, phosphate de potassium, phosphate dipotassique, glycérine, huile de sésame, eau, tocophérols mélangés, huile de menthe verte, conservateurs (phénoxyéthanol, caprylyl glycol, sorbate de potassium).

Bon profil de sécurité

PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS est une solution sans médicament.

Les ingrédients de **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** sont inertes et non toxiques. Sa formule brevetée ne contient pas d'alcool. **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** ne provoque pas de somnolence et convient aux enfants de 6 à 12 ans sous la surveillance d'un adulte. **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** n'est pas connu pour interagir avec d'autres médicaments ou avec d'autres formes de traitement des allergies. L'application de **PREVALIN™ ALLERGIE ENFANTS** ne doit pas affecter l'efficacité des comprimés antihistaminiques.

Chefaro Ireland DAC, The Sharp Building, Hogan Place, Dublin 2, Ireland
Distributeur: PROMOPHARM S.A Zi du sahel Had Soualem Maroc
Dernière révision Novembre 2019
LF23431A
8100002226



Brand:			Application:			Omega Pharma comp. code:			Supplier component code:			Market:			Component size (flat):			Barcode 1 type:			EAN 13												
Prevalin			Allergy Spray			LF23431A			8100002226			Morocco			172 x 300 mm			Barcode 1 nr:			-												
Variant:			Size:			Component type:			Languages on component:			Project nr:			Tech. drawing ref:			Barcode 2 type:			-												
Kids			20ml			Leaflet			French			-			-			Barcode 2 nr:			-												
			 1: C100M72K18			 5: C77M55			 9: -			Manufacturer:			Folded size:			Pharma code:															
			 2: M60Y100			 6: C51M37			 10: -			-			-			-															
			 3: C41Y78			 7: C26M19			Substrate:			Printer:			Specification ref:			Reel Unwind ref:															
			 4: C71M11			 8: -			-			-			-			-															
Pass nr: 0		Pass date: 09.01.2017		Pass nr: 1		Pass date: 12.04.2017		Pass nr: 2		Pass date: 05.05.2017		Pass nr: 3		Pass date: 14.07.20		Pass nr: 4		Pass date: -		Pass nr: 5		Pass date: -		Pass nr: 6		Pass date: -		Pass nr: 7		Pass date: -		Hikma Pharmaceuticals	
FOR APPROVAL - Please valid this proof by signature and send it back to us. Thank you. Please verify this proof carefully concerning lay-out, size, texts and bar code. For the PMS colours please refer to the latest PMS colour guide. After your approval on the above we can proceed to the next stage of your project.																																	

FOR APPROVAL - Please valid this proof by signature and send it back to us. Thank you. Please verify this proof carefully concerning lay-out, size, texts and bar code. For the PMS colours please refer to the latest PMS colour guide. After your approval on the above we can proceed to the next stage of your project.